


EasySleeveGuideの使い方

本製品は内径が2.0mmである。本製品をドリルに装着する時は、2.2mm径のドリルに装着することで良好なドリルへの装着が得られます。なお、2.0mm径のドリルへの装着は緩みが生じるため、使用上は、必ず2.2mmのドリルを使用するようにお願いいたします。

レギュラー型

1
長さを測って
サイズを選ぶ

5.0-10.0mmの6種類

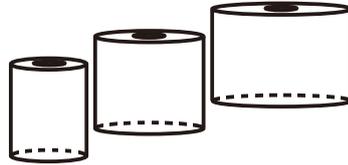


欠損部の補綴物の副径となる長さを計測して、適当なサイズ（5.0-10.0 mmの6種類があります。）のEasySleeveGuideを選択します。

レギュラー型

2
添えてイメージ
を確認

例) 左側下顎第一大臼歯欠損

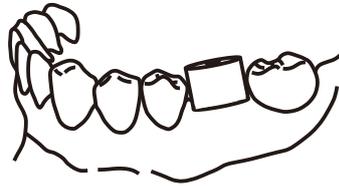

インプラントを植立する部位にEasySleeveGuideを添えて補綴物のイメージを確認します。

レギュラー型

3
ドリルに
付ける




簡単な取り付け

2.2 mm

選んだEasySleeveGuideをドリルに付けます。EasySleeveGuideの内径は2.0mmですので、2.2mm径のドリルに装着してください。

レギュラー型


4
ドリリング
を行う

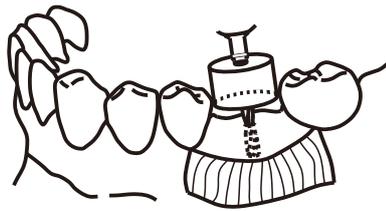

EasySleeveGuideをガイドとしてドリリングします。外部注水を行っていただくようお願いいたします。

アングル型

傾斜埋入時の
目安

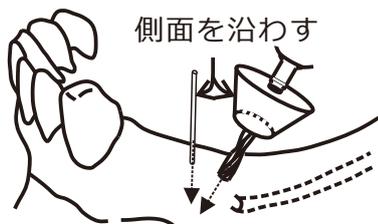

側面を沿わす

アングル型製品を使用するときは、図のごとく、ガイド外の目安となる軸に製品の側面を沿わしながら、ドリリングを進めることで、傾斜角度の目安をとらえることができます。

【ご注意ください】

- 当ガイドは、全インプラント補綴治療症例に対して、完璧なドリリング操作を確証する器具ではありません。症例それぞれに対し、適当でないと判断された場合はご使用をお取りやめください。
- EasySleeveGuideは単回使用として製造されております。特に内芯に残る汚れや微小骨片などによる感染が危惧されるため、複数回使用はおやめください。